

# آمی طب

فروشگاهی متمایز و متفاوت

ارایه کلیه لوازم مصرفی

پوست، مو و زیبایی

[www.iteb.co](http://www.iteb.co)

22850864

## به نام خداوند جان و خرد

### مقدمه

شناختی صحیح و روشن از اقلام پوست و زیبایی می تواند تعاملی مفید و موثر بین فروشنده، پزشک و بیمار بیافریند که این امر در نهایت به خریدی اصلاح و انجام خدمات موثر و متناسب با اهداف درمانی منجر خواهد شد.

مطالب این مجموعه ضمن معرفی محصولات آی طب، شناختی اجمالی از کالاها، کاربرد آنها، مکانیسم اثر و نکات کلیدی کاربردی آنها را ارائه می دهد که امید است منجر به تعاملاتی، که در بالا عرض شد، گشته و نتایج مورد نظر را رقم زند.

با توجه به نوسانات جاری، قیمت های اعلامی جهت اطلاع کلی بوده و ممکن است با نوسانات بازار تغییر یابند

## ژل ها یا فیلر های پوست و زیبایی

در ابتدا ژل ها با نام پاژ به بازار ارائه شدند که از مواد صناعی بوده و مشکلاتی نظیر یخ زدن، جا به جا شدن داشتند و امکان درآوردن آنها دشوار بود.

نسل دوم با نام هایوپلیمرها وارد بازار شدند که آنها نیز مشکلات فوق را یدک می کشیدند. این دو نسل از ژل ها دائمی بودند. نسل جدید ژل های پوست و زیبایی، که با هدف حجم دهی در مناطق مختلف بدن استفاده می شوند، از هیالورونیک اسید ساخته می شوند. هیالورونیک اسید بطور طبیعی در بدن موجود است و پس از تزریق مدت 3 ماه الی 12 ماه جذب بدن می شود بدان معنی که ژل های جدید دائمی نیستند .

برندهای مختلفی در بازار ارائه می شود که هر برندی با توجه به کیفیت کراس لینگ تولید کننده و تکنولوژی های بکار رفته در کراس لینگ از مدت ماندگاری متفاوتی از 3 ماه تا 12 ماه (بعضا تا 18 ماه) را دارند که همین امر قیمت این محصول را نسبت به یکدیگر تعیین می کند

برخی از ژل ها حاوی لیدوکائین نیز هستند که به تکنولوژی سازنده برمیگردد. ژل خوب ژلی است که ماندگاری بالا داشته باشد، با سوزنهای ظریف تر قابل تزریق باشد، در محل تزریق یکدست و همگن شکل گیرد و دچار دون دون شدن، یخ زدگی، شل شدگی و جابجایی نشود.

### ژل های آیدیا

ژل های آیدیا ساخت کشور ایتالیا و دارای مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هستند که در سه نوع زیر به بازار ارائه می شود:

### ژل آیدیا رژنیال :

ژل آیدیا رژنیال در همه نواحی بدن نظیر لب، گونه، خط اخم، خط خنده، خطوط گردن و غیره قابل تزریق است. دارای 25 میلی گرم هیالورونیک اسید در هر میلی لیتر، دارای همه گواهی نامه های بین المللی و مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بوده و با لیبیل آی آر سی به حضور تقدیم می گردد.

### ژل آیدیا لیب:

ژل آیدیا لیب ضمن داشتن 25 میلی گرم هیالورونیک اسید در هر میلی لیتر از غلظت ملایمی برخوردار بوده و تنها ژلی است که با سوزن گیج 30 قابل تزریق است و با این ویژگی، این ژل انتخابی مناسب برای طراحی خط لب، تزریق در چین و چروک های ظریف و نواحی زیر چشم می باشد.

### ژل آیدیا سوپر:

ژل آیدیا سوپر نیز برای مصارف جنرال بوده و همه نواحی بدن نظیر لب، گونه، خط اخم، خط خنده، خطوط گردن و غیره استفاده می شود ویژگی منحصر به فرد آن ماندگاری 12 الی 18 ماه آن است که بیشتر از همه ژل های موجود در بازار است.

انواع ژل های آیدیا ایتالیا

Filler name	Model	Country	Fit size	Price
Idea	Regenyal	Italy	1×1 ml	6/500/000
Idea	Lips	Italy	1×1 ml	6/250/000
Idea	Super	Italy	3 ×1 ml	18/000/000

انواع ژل های رووفیل کره

Filler name	Model	Country	Fit size	Price
Revofil	Ultra	Korea	1×1 ml	5/450/000
مناسب برای خط خنده و خطوط گردن و گونه				
Revofil	Plus	Korea	1×1 ml	5/350/000
مناسب حجم دهی لب و خط اخم				
Revofil	Fine	Korea	1×1 ml	5/250/000
مناسب چین و چروک سطحی اطراف لب و زیر چشم				

انواع ژل های پرفکتا فرانسه

Filler name	Model	Country	Fit size	Price
Perfectha	subskin	France	3×1 ml	18/000/000
مناسب برای خط خنده و خطوط گردن و گونه				
Perfectha	subskin	France	1×3 ml	16/500/000
مناسب برای خط خنده و خطوط گردن و گونه				
Perfectha	complement	France	1×0.8 ml	5/250/000
مناسب چین و چروک سطحی اطراف لب و زیر چشم				
Perfectha	Deep	France	1×1 ml	6/250/000
مناسب برای گونه گذاری و حجم دهی های بزرگ				

**انواع ژل های نورامیس کره جنوبی**

Filler name	Model	Country	Fit size	Price
<b>Neuramis</b>	Deep	Korea	1×1 ml	5/450/000
مناسب برای لب و خط خنده (همه کاره)				
<b>Neuramis</b>	Deep Lidocaine	Korea	1×1 ml	5/750/000
مناسب برای گونه، چانه و پر کردن خطوط عمیق				
<b>Neuramis</b>	Lidocaine	Korea	1×1 ml	5/200/000
مناسب برای لب و خط خنده				
<b>Neuramis</b>	Volume	Korea	1×1 ml	6/400/000
مناسب برای زیر چشم و خطوط سطحی				

**انواع ژل های ژویدرم**

Filler name	Model	Country	Fit size	Price
<b>Juvederm</b>	Ultra 4	France	2×1 ml	20/800/000
مناسب برای لب و خط خنده (همه کاره)				
<b>Juvederm</b>	Voluma	France	2×1 ml	22/700/000
مناسب برای گونه، چانه و پر کردن خطوط عمیق				
<b>Juvederm</b>	Volift	France	2×1 ml	22/000/000
مناسب برای لب و خط خنده				
<b>Juvederm</b>	Volbella	France	2×1 ml	24/800/000
مناسب برای زیر چشم و خطوط سطحی				

**انواع ژل های اوماژنس**

Filler name	Model	Country	Fit size	Price
<b>Umajeunesse</b>	Classic	England	2×1 ml	7/500/000
<b>Umajeunesse</b>	Classic	England	1×1 ml	4/500/000
مناسب برای خط خنده و خطوط گردن و گونه (همه کاره)				

### انواع ژل های آلاینای آلمان

Filler name	Model	Country	Fit size	Price
<b>Alayna</b>	SG 24	Germany	2×1 ml	12/000/000
مناسب برای گونه، چانه، گردن و ... (همه کاره)				
<b>Alayna</b>	M8	Germany	2×1 ml	12/000/000
مناسب چین و چروک سطحی				

### بوتاکس:

بوتاکس در واقع محصولی است که از سم باکتری بی هوازی بوتولینیوم تهیه می شود این همان سم تشکیل شده در کنسرو ها مانند تن ماهی است. سم بوتولینیوم اثر فلج کننده عضلانی دارد و با ورود به بدن موجب فلج عضله ریه و قلب شده و موجب مرگ فوری بیمار می شود.

سم بوتولینیوم در آزمایشگاه بصورت ضعیف شده و کنترل شده تولید و در پزشکی برای ایجاد فلج عضلانی استفاده می شود بطور مثال فردی که در اثر سکتة مغزی تغییر چهره پیدا کرده مانند : ( کج شدن لب ها ) جراح مغز و اعصاب با فلج کردن عضله ایجاد کننده این عارضه ، چهره بیمار را به حالت طبیعی بر می گرداند.


در زیبایی می توان با فلج کردن عضلاتی ، که با انقباض خود باعث ایجاد خطوطی نظیر خط اخم ، چین و چروک دور چشم (پنجه کلاغی) و خطوط پیشانی می شوند، همه این عوامل را از چهره بیمار زدود و جوانی را تا مدت اثر سم به بیمار هدیه نمود.

روش تزریق در بوتاکس از اهمیت ویژه ای برخوردار است و شناختن هر عضله و بهترین نقطه تزریق آن و مقدار تزریق متناسب و عمق دقیق آن، نتایج کار را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.


هر گونه اشتباه در محل نقاط، عمق آنها و مقدار آنها، می تواند موجب عوارضی نظیر پتوز شود. همچنین شناخت نقاط ممنوعه تزریق بوتاکس و نیز تنظیم نقاط تزریق بر اساس اهداف بیمار ( مثلا ابرو بالا برود یا نرود ) میتواند رضایت بیمار را، که هدف نهایی همه ی خدمات ماست، را به دنبال داشته باشد.

ضمناً بهتر آن است در تزریق اول دقت لازم انجام شود که تزریق ترمیمی لازم نباشد. با توجه به این که بیشترین خواسته بیماران بوتاکس در صورت، شامل رفع خطوط پیشانی ، خطوط اخم به همراه بالا رفتن یا ثابت ماندن ابرو می باشد، در زیر دو طرح نقاط تزریق بوتاکس (نقاطی که ابرو بالا برود)(نقاطی که ابرو بالا نرود) تقدیم می گردد.

امید است در جهت تزریق صحیح بوتاکس مورد بهره برداری قرار گیرد.

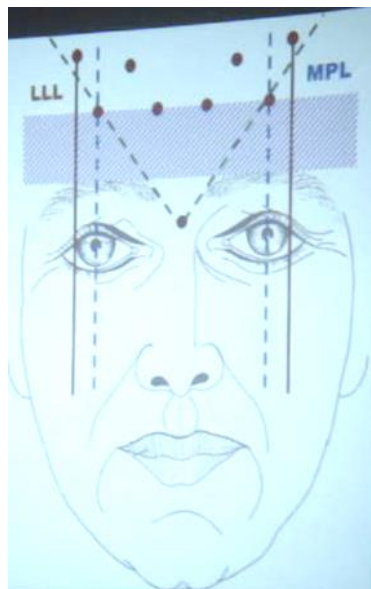

ابروها بالا نمی رود

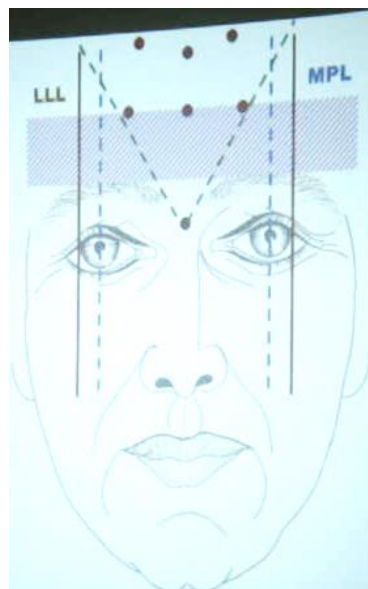

ابروها بالا می رود

بعد از تزریق بوتاکس لازم است بیمار تا 5 ساعت به هیچ عنوان دراز نکشد، به هیچ عنوان سر را خم نکند و محل های موضع تزریق بوتاکس را شستشو ندهد همچنین تا سه روز محل های تزریق بوتاکس را ماساژ ندهد.

طریقه نگهداری بوتاکس هم اهمیت خاصی دارد. برخی از آنها در دمای زیر صفر و برخی در دمای یخچال و برخی در دمای عادی نگهداری و حمل می شود و این موضوع حتما باید رعایت شود.

#### انواع بوتاکس ها

Name	Fit Size	Country	Paint Max	Constant	Add N\S	Price
Dysport	500 Unit	UK	3 Person	7 or 8 Month	2/4cc	
Dysport	300 Unit	UK	2 Person	7 or 8 Month	1/6cc	
Neuronox	100 Unit	Korea	2 Person	6 or 7 Month	2cc	
Neuronox	50 Unit	Korea	1 Person	6 or 7 Month	1cc	
Neuronox	200 Unit	Korea	4 Person	6 or 7 Month	4cc	
Xeomin	100 Unit	Germany	2 Person	6 or 8 Month	2 cc	
Xeomin	50 Unit	Germany	1 Person	6 or 8 Month	1 cc	
Masport	500 Unit	Iran	3 Person	6 or 8 Month	3cc	

## مزوتراپی:

روشی است که درمان ضایعات و بیماریهای پوستی را نه بصورت سیستمیک بلکه بصورت موضعی دنبال می کند بطور مثال برای تقویت موی یک فرد یک قرص 300 میلی خوراکی تجویز می کنید این قرص از همه اعضا مثل کبد و کلیه عبور می کند و صرفاً شاید 20 میلی گرم از آن به موی سر می رسد و بقیه آن موجب رشد بیشتر موهایی می شود که اصلاً نمی خواهیم رشد کنند مانند موهای ناحیه تناسلی و زیر بغل .

در مزوتراپی همین قرص 300 میلی را به صورت آمپول تهیه نموده و مستقیماً در کنار فولیکول های موی سر تزریق می کنید. که هم دارو به صورت سیستمیک از کل بدن عبور نمی کند و هم نواحی غیر خواسته دارو را دریافت نمی کنند . مزوتراپی به طو کلی مواردی نظیر درمان های جوانسازی، رفع ریزش مو، درمان لک و پیس و چربی سوزی (لاغری موضعی) را دنبال می کند و برای هر کدام از اهداف درمانی تنوعی از داروها را به صورت سینگل و ترکیبی تدارک دیده است. این داروها دارای پروتکل های مختلفی نسبت به همدیگر بوده و در عمق های مختلفی از پوست نظیر سوپر فیشیال، درم سطحی، درم عمقی، زیر درم و داخل چربی ها (هایپودرم) تزریق می شوند. مزوتراپی در سالهای اخیر موفقیت های زیادی را کسب کرده و در حال حاضر به عنوان یکی از درمانهای موثر و مفید حوزه زیبایی مطرح است.

کمپانی های زیادی هم در زمینه تولید داروهای مزوتراپی فعال هستند و آنها را به صورت کوکتل و بعضاً به صورت سینگل تولید و به بازار ارائه میکنند . رعایت پروتکل سازنده از نظر مقدار تزریق، عمق تزریق، فواصل مکانی تزریق و فواصل زمانی تزریق در نتایج درمان بشدت تاثیر گذار است .

### **بطور مثال کوکتل چربی سوز برند درماهیل با پروتکل زیر تزریق می شود:**

عمق تزریق : هایپودرم (13 میلی متر)، مقدار تزریق : حداکثر 3 ویال در هر جلسه، فواصل مکانی تزریق: 1 سانتی متر، مقدار هر تزریق در هر نقطه: 0.2 میلی لیتر، فواصل زمانی تزریق: ماه اول هر هفته و ماه دوم هر دو هفته و ماه سوم یکبار در مجموع دو نوع سوزن در انواع درمان های مزوتراپی استفاده می شود که شامل سوزن 4 میلی متر با گیج 30 برای تزریق های نقطه به نقطه و سوزن 13 میلی متر با گیج 30 برای تزریق های خطی و خطوط مختلف.

یادآوری اینکه دستگاه مزوگان یا تفنگ مزوتراپی برای تزریق های مزوتراپی ساخته شده است که سرنگ حاوی دارو به صورت خشاب درون آن قرار می گیرد و مقدار هر تزریق و عمق آن روی دستگاه قابل تنظیم است و می تواند در اجرای صحیح و سریع و دقیق اعمال مزوتراپی موثر باشد.

در زیر جدول بسیاری از کوکتل های برندهای مختلف به همراه کاربرد هر کدام از آنها آورده شده است امید است در انتخاب محصول مورد نظرتان مفید واقع شود.



## کوکتل های در ماهیل کره جنوبی:

کمپانی کارژن کره جنوبی تولید کننده کوکتل های برند در ماهیل است این کمپانی کاملا علمی و دارای آزمایشگاههای تخصصی مستقل تولید بیو مواد فوق العاده بی نظیر در درمان و رفع ضایعات پوست و زیبایی است که تقریبا اثر هر کدام از کوکتل ها در تحقق انتظار درمانی مورد نظر کوکتل، برای درمانگر و بیمار صد در صد محسوس است این کوکتل ها دارای مجوز وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند در زیر توضیحات هر کدام از آنها جهت استحضار ارائه شده است:

### کوکتل مزوتراپی رفع ریزش مو (HL):

این کوکتل برای رفع ریزش مو و تحریک باز رشد موها و تقویت تار موهای موجود، استفاده می شود و بصورت مزوتراپی و مزورولر (میکرونیدلینگ) قابل استفاده است.

محتویات:

Insulin – like Growth Factor – 1(IGF-1)  
Basic Fibroblast Growth Factor (bFGF)  
Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF)  
Copper Tripeptide – 1 /Multi – vitamins / Amino acids and Minerals

### کوکتل جوانسازی و لیفتینگ پوست (HSR):

برای رفع چین و چروکهای ظریف و دوباره سازی سلولهای پوست، افزایش کلاژن و الاستین و بالانس رطوبت پوست و بهبود قابلیت کشیدگی پوست و قابل استفاده بصورت تزریق مزوتراپی و مزورولر (میکرونیدلینگ)

محتویات:

Epidermal Growth Factor (ERF) Insulin – Like Growth Factor -1 (IGF-1)  
Basic Fibroblast Growth Factor (bfGF) Thioredoxin (TRX) /Copper Tripeptide  
Hyaluronic Acid (1.0%) /Multi - vitamins / Amino acids and Minerals

کوکتل SR نیز شامل همین محتویات بدون هیالورونیک اسید است و به منظور جوانسازی استفاده می شود.

### کوکتل ضد لک و روشن کننده پوست (SB):

این کوکتل کاهنده هیپرپیگمانتاسیون از طریق کاهش سنتر ملانین بوده و برای رفع لک و پیس و لکه های حاصل از افزایش سن بصورت تزریق مزوتراپی و مزورولر (میکرونیدلینگ) استفاده می شود.

محتویات:

CG- TGP2 (Oligopeptide -34)/CG-ASP (Pentapeptide-13)  
Ascorbic acid (vitamin C) / Arbutin

### **کوکتل چربی سوزی و لاغری (LL):**

این کوکتل به منظور چربی سوزی، ایجاد لاغری و نیز افزایش سنتر کلاژن برای بهبود الاستیسیته پوست در نواحی غبغب، بازو، شکم، پلو و ران استفاده می شود. قابل استفاده فقط بصورت تزریق مزوتراپی

محتویات:

Insulin – like Growth Factor – 1(IGF-1/ Phosphatidylcholine)

L-Carnitine Multi - vitamins / Amino acids and Minerals

### **کوکتل رفع تیرگی دور چشم (DARK CYRCL):**

کوکتل ویژه برای تیرگی دور چشم، قابل استفاده بصورت تزریق مزوتراپی و مزورولر (میکرونیدلینگ)

محتویات:

Water (Aqua) / Oligopeptide-34

Oligopeptide-24 / decapeptide -4

### **کوکتل رفع پف زیر چشم (EYE BAG):**

ویژه درمان پف زیر چشم، قابل استفاده بصورت تزریق مزوتراپی و مزورولر (میکرونیدلینگ)

محتویات:

Water (Aqua)/ Tripeptide -41

Nonapeptide -18 / Oligopeptide-61 / Oligopeptide-73

### **بوسترها یا تقویت کننده های در ماهیل:**

کمپانی کارژن برای هر یک از کوکتل های در ماهیل یک بوستر ارائه داده است که بصورت ترکیب با در ماهیل مورد نظر، اثر آن را چندین برابر بهبود می بخشد بوسترها به صورت پودر بوده و کوکتل در ماهیل، که به صورت ویال 5 میلی لیتری است، به روی آن اضافه می شود در صورت تمایل به افزایش قابل توجه نتایج درمانی مورد نظرتان و یا وخامت ضایعات مورد درمان، (به طور مثال ریزش شدید مو) می توانید از بوسترها کمک بگیرید و نتایج بهتری را بدست آورید.

## انواع کوکتل های درماهیل کره

Name	Function	Volume	Price
HL	ضد ریزش مو و تحریک باز رشد مو	5ml	900/000
HSR	جوانسازی پوست و رفع چین و چروک و لیفتینگ	5ml	950/000
SB	رفع لکه های پوست	5ml	900/000
LL	درمان سلولیت و کاهش چربی های موضعی	5ml	900/000
SR	جوانسازی	5ml	900/000
Dark Circle Solution	سیاهی زیر چشم	1.5 mg	1/950/000
Eyebag Solution	پف زیر چشم	1.5 mg	1/950/000

## بوسترهای درماهیل برای تقویت اثر کوکتل های درماهیل

بوستر	ترکیب با	قیمت	محتویات
m.boster hair	Dermaheal HL	2,650,000	Trehalose/ sodium chloride/decapeptide-18/ Oligopeptide-54/ decapeptide-10 / Oligopeptide-42
m.boster face	Dermaheal SR	2,650,000	sodium chloride/ tripeptide34/ Oligopeptide-53 /Oligopeptide-73
m.boster super brightening	Dermaheal SB	2,650,000	Piper longum Fruit Extract/sodium chloride/Trehalose/Arbutin/Niacinamide/Oligopeptide- 34/Oligopeptide-51/Oligopeptide-50/Oligopeptide-13
m.boster body	Dermaheal LL	2,650,000	sodium chloride/ tripeptide-41/ Oligopeptide- 61/Oligopeptide-51

انواع کوکتل های مزودرمال امریکا

Name	Function	Volume	Price
MesoPecia	درمان ریزش مو(مخصوص آقایان)	10ml	9/500/000
AndroPecia	درمان ریزش مو (مخصوص بانوان)	10ml	6/500/000
Meso lighten	روشن کننده و ضد لک	10ml	9/500/000
Lipotrim	لاغری و رفع غبغب	10ml	6/500/000
Minoxipecia	ماینوکسیدیل	10ml	7/500/000
Finestride	مکمل ریزش مو ارثی آقایان	10ml	9/500/000
Mesofirmlift	لیفت	10ml	6/500/000
Mesocontour	فرم دهی بدن و از بین بردن سلولیت	10ml	6/500/000
Glutamcax	ضد لک	10ml	7/500/000

انواع کوکتل های ولودرم اسپانیا

Name	Function	Volume	Price
Acne Pro	درمان آکنه و پیگمنتیشن	10ml	2/200/000
Lipoburn	درمان سلولیت و چربی های موضعی	10ml	2/200/000
Face Lift System 20	احیا و جوانسازی و لیفت پوست	5ml	1/500/000
Botulopeptide	رفع چین و چروک پوست	5ml	1/500/000
Face Care	رفع چین و چروک و شلی پوست و شفاف سازی	10ml	2/200/000
Revital Peptide	روشن کننده و احیای پوست	5ml	1/500/000
Hyaluronic Acid 3.5%	جوانسازی و آبرسانی پوست	5ml	2/000/000
Active Peptide+HA	مولتی ویتامین و احیای پوست و تیرگی پوست و آبرسانی	5ml	1/500/000
Vit-C	جوانسازی	2ml	200/000
Silanol 1%	رفع شلی پوست لاغری و جوانسازی	5ml	250/000

**انواع کوکتل های مزوتوسکانی اسپانیا**

Name	Function	Volume	Price
<b>Hair Cocktail Plus</b>	درمان ریزش مو	10ml	2/500/000
<b>Mesolift Cocktail</b>	بازیابی قوام و لیفت پوست گردن و صورت	10ml	2/500/000
<b>Anti Ageing Cocktail</b>	جوانسازی صورت و بدن (آنتی اکسیدان خیلی قوی)	10ml	2/500/000
<b>Purifying</b>	رفع جای جوش و اسکار	10ml	2/500/000
<b>Radiance</b>	رفع لکه های پوستی	10ml	2/500/000
<b>Sliming , Anticellulite</b>	لاغری و سلولیت	10ml	2/500/000
<b>Regenerating</b>	استرچ مارک و اسکار و جوانسازی	10ml	2/500/000
<b>Glutomax</b>	جوانسازی و مزو لیفت	5ml	1/500/000
<b>NCPR</b>	جوانسازی	5ml	3/200/000
<b>FCE</b>	فاکتور رشد و جوانسازی	5ml	2/500/000

**انواع کوکتل و دارو های سینگل کمپانی بی سی ان اسپانیا**

Name	Function	Volume	Price
<b>BCN Base</b>	جوانسازی	3ml	1/300/000
<b>BCN Scalp</b>	جلوگیری از ریزش مو	5ml	1/300/000
<b>BCN Melano</b>	رفع لکه های پوستی	5ml	1/300/000
<b>BCN ECQ10</b>	جوانسازی صورت و بدن	5ml	1/300/000
<b>BCN Lumen</b>	رفع لک	5ml	2/800/000
<b>Hyaluronidase</b>	درمان سلولیت	5ml	3/000/000
<b>Hyluronic Acid 3.5%</b>	جوانسازی پوست آبرسانی و مزولیفتم	5ml	2/500/000
<b>Ginkgo Biloba</b>	سلولیت، ریزش مو، تیرگی دور چشم	5ml	300/000
<b>Biotin</b>	کاهش چین و چروک ، تقویت فولیکول مو	2ml	250/000
<b>Asian Centella</b>	سلولیت، رفع ریزش مو، پیشگیری از پیری پوست	2ml	220/000
<b>Artichoke Extract</b>	کاهش چربی های موضعی	5ml	200/000
<b>Phosphatidylcholine</b>	درمان سلولیت، کاهش چربی موضعی	5ml	400/000

<b>Dexpanthenol</b>	جوانسازی، مقابله با ریزش مو	5ml	300/000
<b>Glycolic Acid</b>	مزولیفیت	2ml	350/000
<b>Argireline</b>	ضد پیری و لیفت اطراف چشم	2ml	350/000
<b>Glutathione</b>	جوانسازی پوست، رفع لکه قهوه ای	5ml	650/000
<b>Caffeine</b>	درمان سلولیت، تقویت مو	2ml	250/000
<b>Rutin + Melilot Extract</b>	درمان سلولیت به ویژه در ناحیه غبغب	2ml	300/000
<b>L-Carnitine</b>	کاهش چربی های انباشته شده موضعی	5ml	380/000
<b>Amino Acid</b>	جوانسازی، رفع افتادگی پوست	2ml	350/000
<b>Vitamin C</b>	جوانسازی، مزولیفیت	5ml	450/000
<b>PolyVitamins</b>	جوانسازی	2ml	330/000
<b>Trace Elements</b>	جوانسازی	2ml	300/000
<b>Vitamin A</b>	جوانسازی، رفع چین و چروک	2ml	350/000
<b>Sodium Pyruvate</b>	جوانسازی، رفع چین و چروک	2ml	280/000
<b>Organic Silica</b>	جوانسازی، مزولیفیت	5ml	350/000
<b>DMAE + Organic Silica</b>	لیفتینگ، رفع شلی و افتادگی	5ml	450/000
<b>DM-Lift</b>	لیفتینگ، رفع شلی و افتادگی	5ml	360/000
<b>DNA Liquid (Xadenal)</b>	در ترکیبات جوانسازی و اسکار	2ml	320/000

### آمپول های هیدرودرمی موضعی لوسون کانادا:

برخی از محصولات مزوتراپی به صورت آمپول (شکل تزریقی) ساخته می شوند لیکن تزریقی نیستند و بعد از شکستن آمپول، در موضع مورد نظر مالیده و ماساژ داده می شوند. این محلول ها (آمپول ها) اثر قابل توجهی داشته و بطور مثال نوع آنتی آکنه آن در درمان جوش های فعال و پیشگیری از بروز مجدد جوش اثر قابل ملاحظه ای دارد. همچنین این آمپول ها می تواند همراه با میکرونیدلینگ در موضع عمل چکانده شوند.

شایان ذکر است این محصولات در صورتی که پس از میکرونیدلینگ استفاده شود به دلیل جذب بالا و سریع، اثر فوق العاده ای خواهند داشت. این محصولات ساخت کمپانی لوسون کانادا بوده و در ایران بسته بندی می شوند و از قیمت مناسبی برخوردارند. جدول این محصولات در زیر آورده شده است.

### آمپول های هیدرودرمی موضعی لوسون کانادا

Name	Fit Size	Price
Anti-Acne (ضد جوش)	10×2 cc	3/000/000
Elastin Collagen (کلاژن ساز)	10×2 cc	3/000/000
Essential Hydrating (آبرسان)	10×2 cc	3/300/000
Q 10 (جوان کننده)	10×2 cc	3/300/000
Botax Like (ضد چروک)	10×2 cc	3/300/000
آمپول موضعی نیروبخش مو	20cc	700/000
آمپول موضعی ترمیم مو	20cc	700/000
Biofol شامپو حالت دهنده	250ml	700/000
Biofol شامپو براق کننده	250ml	700/000

### پی آر پی تعریف، مکانیسم عمل، تاریخچه و کاربردها

PRP (Platelet-Rich Plasma) محصولی است که از سانتریفیوژ کردن خون لخته نشده تهیه می شود به این ترتیب که اگر خون لخته نشده سانتریفیوژ شود، به طور مثال با دور دو هزار در دقیقه به مدت ده دقیقه، گلبول های قرمز، که سنگین تر از پلاکت ها و گلبول های سفید هستند، تحت نیروی گریز از مرکز در نیمه پایینی لوله و پلاکت ها و گلبول های سفید در نیمه بالایی لوله قرار میگیرند.

در قدیم عقیده بر این بود که پلاکت ها صرفا مسئول انعقاد خون هستند و هر گونه جراحت در دیواره رگها موجب برخورد پلاکت به کلاژن تایپ یک دیواره رگ شده و پروسه آبخاری انعقاد خون را استارت می زند ولی تحقیقات اخیر نشان داده است که پلاکت ها پس از انعقاد خون، تعداد سی و دو فاکتور رشد از خود آزاد می کنند که این فاکتور ها با برخورد به سلولهای بنیادی، ترمیم بافت جراحت دیده را رقم می زند.

زند.

در صورت صحت موارد فوق، به نظر می رسد اگر پلاکت های بیشتری روی یک زخم قرار بگیرد ترمیم آن را تسریع می کند این موضوع در آزمایشات مختلفی ثابت شده است در آزمایشی که دو زخم همسان روی یک دست ایجاد و به روی یکی از آنها پلاکت گذاشته شد زخم حاوی پلاکت پنج روز سریعتر ترمیم یافت .

### کاربرد های prp

### در ارتوپدی و پزشکی ورزشی:

- ✓ تاندونیت ها نظیر؛ آرنج تنیس بازان، آرنج گلف بازان، پارگی و کشیدگی تاندون، پارگی و کشیدگی عضلات
- ✓ پارگی و آسیب رباط ها اغلب در نواحی زانو، شانه و دست، شکستگی های استخوان بصورت ساده و مرکب

- ✓ استئوآرتريت ها از جمله؛ استئوآرتريت مفاصل هيپ، زانو، آسيب غضروفي، بورسيت و كپسوليت
- ✓ و مواردی مانند خار پاشنه

### در ترميم بافت :

- ✓ درمان زخم بستر، زخم های مزمن، زخم های ديابتي، درمان سوختگی های درجه دو و سه
- ✓ بهبود سريع زخم های بخیه شده، درمان خراشیدگی های سطحی و عمقی پوست
- ✓ همراه با انواع جراحی های پیوند عضو به منظور ارتقای نتایج درمان
- ✓ و هر مورد مشابهی که، تسريع ترميم، به درمان آن کمک کند.

### در پوست، مو و زیبایی :

پی آر پی در حوزه پوست و زیبایی به شکل های مختلفی تهیه می شود که هر کدام اهداف درمانی متفاوتی را دنبال می کند در زیر به کاربرد برخی از آنها اشاره می شود.

### پی آر پی ساده :

- به منظور جوانسازی صورت، رفع چین و چروک ها و خطوط گردن و پیشانی، خنده و اخم
- رفع لک های قهوه ای سطحی و تقویت پوست، رفع تیرگی دور چشم و چین و چروک دور چشم
- تقویت فولیکول های مو، تحریک باز رشد موها، رفع ریزش و به همراه کاشت مو

### سوپری آر پی :

پی آر پی تغلیظ شده است که اثر قوی تری دارد.

### فیلر پی آر پی :

- مواردی نظیر گودی پایین چشم، خطوط عمیق خنده، اخم، پیشانی، گردن، طراحی لب، گونه گذاری، طراحی چهره و ...
  - و هر موردی که رفع یا انجام آن نیازمند حجم دهی است.
- پی آر پی فیلر تحت پروسه خاصی به آسانی از پی آر پی ساده تهیه می شود.

### کرم پی آر پی :

- با اضافه نمودن پی آر پی، به کرم بیس مرطوب کننده تهیه می شود و کاربردهای فراوانی دارد نظیر:
- استفاده به عنوان کرم روز برای لطافت پوست و رفع پیری پوست
  - بعد از میکرونیدلینگ اسکارها، بعد از لیزرهای ابلیتیو، بعد از میکرودرم ابریژن، بعد از میکرونیدلینگ جوانسازی
  - بر روی خراشیدگی های خفیف و شدید پوست، در پروسه مراقبت پوست و حساسیت زدایی پوست.

### چشم پزشکی :

- پی آر پی بصورت قطره چشمی تهیه و برای درمان موارد ذیل در اختیار بیمار قرار می گیرد:
- سندروم خشکی چشم، ترميم بعد از ليزر سطحی چشم، زخم های اپیتلیال قرنیه و ..



### کیت های پی آر پی

Name	کشور	Model	Price
Standard Kit	Iran	2 Tube	1/500/000
Cellwik	Iran	پکیج تک لوله پوست جنرال	106/000/000
Cellwik	Iran	پکیج دو لوله پوست جنرال	119/000/000
Cellwik	Iran	پکیج تهیه کرم	510/000
Cellwik	Iran	پکیج تهیه سوپر	139/000/000
Cellwik	Iran	پکیج تهیه فیلر (ژل)	116/000/000
Cellwik	Iran	پکیج تک لوله ارتوپدی	106/000/000
Cellwik	Iran	پکیج دو لوله ارتوپدی	119/000/000

### ماسک ها:

ماسک ها اهمیت ویژه ای در درمانهای پوست و زیبایی دارند. این ماسکها حاوی موادی طبیعی مانند ماسک درخت چای و صناعی مانند ماسک هیالورونیک اسید، هستند که استفاده آنها، با توجه به ماده موثر داخل آنها، به خصوص بعد از میکرونیویدلینگ، لایه برداری (میکرودرم ابریژن)، لیزر و مراقبت های پوست، می تواند اثرات فوق العاده ای را در نتایج درمان رقم زند و بخشی از انتظارات درمانی پزشک و بیمار را تحقق بخشد. این ماسک ها بصورت پودری (گچی) و ورقه ای (که به مواد موثر آغشته شده است) ساخته می شوند که اخیرا انواع گچی غیر مرسوم و انواع ورقه ای مصرف بیشتری را دارد. در زیر انواع ماسک های ورقه ای پورتری کره با کاربرد آنها آورده شده است.

نوع ماسک	کاربرد
تمشک	برای پوست های کدر، خشک، کک و مک، جوش و جای جوش
مروارید	برای پوست های کدر، بی رمق و حساس، روشن کننده، التیام دهنده
لیمو	برای انواع پوست بویژه پوست های چرب، کدر و جوش دار، ضد قارچ
عسل	برای پوست های خشک، مسن و ملتهب
درخت چای	برای جوشهای غرور جوانی
چای سبز	برای پوست های حساس چرب و یا نیمه چرب و خسته
هیالورونیک	برای پوست های خشک و پوست های چرب آب از دست داده
کلاژن	مناسب پوست های خشک
آلوورا	برای پوست های آسیب دیده، چرب، حساس و آفتاب سوخته
هیدروژل	حاوی خاویار و لیمو برای ایجاد شادابی و زیبایی رنگ پوست
هیدروژل	حاوی پپتاید و کلاژن سفت کننده، مرطوب کننده، دارای کلاژن دریایی، لیفتینگ پوست های خسته

## دستگاه ماساژور موی سر :

راه موثر جلوگیری از ریزش موی سر:

استیمو ویت معجزه گر نیست بلکه ماساژوری است که با دو سرعت و حرکات متناوب، با تحریک رگهای خونی پوست سر باعث سرعت و شدت بخشیدن گردش خون اطراف پیاز مو می گردد و در تعدادی از دانشگاههای معتبر ژاپن مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج عالی نشان داده است. همچنین استیموویت اولین تحریک کننده استیمولاتور(ماساژور) برقی بدون وایبراسیون است که موجب شدت یافتن جریان خون اطراف پیاز مو می شود و برای فعال کردن پیاز موی ضعیف شده و از کار افتاده بکار می رود.

## دستگاه ماساژور بدن:

سلولیت یا چربی چیست؟

چنانچه بدن با افزایش ورود چربی های غذایی مواجه شود و یا به دلیلی قادر به متابولیسم و سوزاندن چربی های اضافی نباشد، این مواد درون سلولها انباشته شده و با تراکم و افزایش سلولهای چربی در مناطق مختلف بدن، توازن و تناسب بدن را مختل می سازد. و این افزایش نا موزون در حجم و وزن بدن، بتدریج با اعمال فشار بر ارگانهای دیگر بخصوص مفاصل باعث اختلالات کلی گشته و ایجاد کسالت و بیماری می نماید.

این بافت های چربی غالباً در نواحی شکم، باسن، بازوها و پاها تجمع می یابد. امروزه یک راه اثبات شده و موثر در کنترل اثرات زیانبار سلولیت، ماساژ موضعی و روزانه بوسیله دستگاه ماساژور می باشد که این عمل را دستگاه سلی ماساژور به بهترین نحو انجام می دهد.

## کاربرد های ماساژور بدن :

- لاغری و تناسب اندام، دردهای عضلانی و آرتروزی، کمک به درمان آرتروز مفاصل
- رفع کوفتگی و درد اندام ها، رفع خستگی و استرس، جلوگیری از زخم بستر
- در زیر جدول قیمت ماساژور ها آماده است

<b>ماساژور</b>		
Name	Country	Price
ماساژور سر	Iran	1/200/000
مزوماساژور ویژه سر پس از درمانهای مزوتراپی رفع ریزش مو		
ماساژور بدن	Iran	890/000
ماساژور بدن برای لاغری ، تناسب اندام ، درمان سلولیت و ...		

## برخی مواد مصرفی دیگر پوست و زیبایی

### سر سوزن سابسیژن :

بسیاری از جای جوش ها و جای زخم هایی که شکل گودی گرفته اند در واقع به بافت زیرین خود چسبندگی داده و درمانهایی نظیر میکرونیدلینگ، لیزر فراكشینال در صاف کردن آن تاثیری نخواهد داشت . این ضایعات تنها در صورتی صاف می شوند که مورد سابسیژن قرار گیرند بدین معنی که از بافت زیرین خود جدا شوند. سابسیژن به دو روش انجام می شود در مواردی که تعداد گودی ها محدود است از سر سوزن نوکور ، که انتهای آن خنجری است، برای برش چسبندگی استفاده می شود در مواردی که مساحت زیادی از صورت فرد مبتلا به این ضایعات است از ست سابسیژن ویژه ای با روشی شبیه تام سنت تخلیه چربی شکم و بوسيله كانولای مخصوص انجام می شود.

### درمارولر برای میکرونیدلینگ:

میکرونیدلینگ روشی است که با نیدلینگ پوست به تعداد بالا موجب تحریک بافت سازی در موضع شده و تاثیرات فوق العاده ای در بازسازی پوست های پیر، رفع چین و چروک ، رفع لک و پیس و جوانسازی دارد. دستگاه میکرونیدلینگ یا درمارولر دارای غلطکی است که حدود 190 تا 540 سوزن در روی آن است که با چرخاندن روی پوست، موضع عمل را به تعداد هزاران بار به صورت خیلی ظریف سوراخ می کند بدون آنکه آسیب کلی به بافت برساند.

ترکیب میکرونیدلینگ با کوکتل های مزوتراپی و کرم پی آر پی اثرات آن را در جوانسازی و رفع ریزش مو و نیز درمان جای زخم به طور فوق العاده ای بهبود می بخشد.

برخی از مواد مصرفی پوست و زیبایی در نوع خاص بوده و قابل جایگزین با مواد مشابه نیستند و لازم است عینا از منابع معتبر تهیه و استفاده شوند. موادی نظیر کرم رافوس که با دستگاههای آر اف تایتینینگ، عینک پزشک که فیلتر تخصصی برای جلوگیری از برخورد لیزر به چشم پزشک و ژل هیدرودرمی که با دستگاه هیدرودرمی استفاده می شود و ژل التراسون که همراه دستگاه کاپیتاسیون الزامی است .

### محصولات مصرفی

Name	Model	Country	Fit Size	Price
نیدل مزوتراپی	Ava	Iran	All Of Sizes	700/000/Box
سرنگ لاور لوک	BD	USA	1cc	85/000
		China	1cc	20/000
سر سوزن سابسیژن	BD	USA	18 G & 16 G	180/000
كانولا			21G & 22 G & 25 G	180/000
سری میکرودرم	مداریا و آفا	ایران		6/000
عینک پزشک	فیلتر شیشه ای			6/800/000
یودر میکرودرم			5 کیلو	2/400/000

کرم رافوس	یک کیلو		ویژه دستگاه آر اف	5/000/000
درمارولر			تمام سایز ها	700/000
اسکالپ				10/000
هولدر				5/000
رابط سرنگ به سرنگ				30/000
ژل بی رنگ	شفا	ایران	5lit /350000	1lit /70000
کرم بی حسی	زیلاپی	ایران	70g	120/000
ژل هیدرودرمی		ایران		800/000
کارت ریج درمانی	-	china	1 & 3 & 5 Needle	100/000
			12 Needle	140/000
			36 Needle	140/000

### موارد ویژه برای فروش:

name	country	price
سانتریفیوژ پی آر پی	ایران	2/500/000
دستگاه پلاسما ژل	ایران	2/000/000
اکانت وب سایت ویکی درم	ایران	250/000
کتاب دانشنامه پوست و زیبایی	ایران	155/000

### کتاب دانشنامه پوست و زیبایی

این کتاب در 438 صفحه حاوی همه اطلاعات علمی پوست و زیبایی شامل پی آر پی درمانی، مزوتراپی، سلولیت و لاغری و نور و لیزر در قطع وزیری و جلد گالینگور چاپ شده است که تهیه و استفاده از آن را به همه فعالان پوست و زیبایی توصیه می کنیم

## اکانت وب سایت بین المللی دانشنامه ی پوست و زیبایی ایرانیان

معرفی

ویکی درم دانشنامه بین المللی پوست و مو و زیبایی ایرانیان است که بصورت یک وب سایت تخصصی، توسط آقای دکتر منتظری، که از سال هشتاد و سه تاکنون نویسنده تعداد زیادی از کتابها و مجلات این حوزه بوده اند، با اخذ مشورت از بزرگانان و فعالان بنام حوزه پوست و زیبایی کشور راه اندازی شده است.

اهداف

هدف از راه اندازی این سامانه تامین منبعی واحد و یکدست و منظم و علمی از اطلاعات و مطالب پوست و زیبایی است که به آبخور اطلاعاتی و منبع معتبر مخاطبین عام و خاص حوزه زیبایی بدل شود بطوریکه در مقابل هر سوالی که در ذهن مخاطب خاص (یعنی پزشکان و فعالان این حوزه) و مخاطب عام (عموم مردم) شکل می گیرد پاسخی از چند دیدگاه مختلف را ارائه نماید اقدامات انجام شده

هم اکنون تعداد حداقل 1800 مطلب با دسته بندی متنوع در سایت آپلود شده که بسیاری از نیازمندی های اطلاعاتی همه فعالان درمانی، دارویی، تجاری و آرایشی حوزه پوست و نیز عامه مردم را تامین میکند لیکن در نظر است در چند ماه آینده این تعداد به 10000 مطلب افزایش تا به کاملترین مرجع حاضر بدل شود.

اهداف جنبی

از زاویه ای دیگر، ویکی درم مانند یک انجمن مجازی طراحی شده است که بتواند به عنوان پایگاه مشتری را برای حضور علمی، تجاری و تبلیغاتی همه فعالان پوست و زیبایی فراهم سازد بطوریکه همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه پوست مشغول به کارند میتوانند در سایت ثبت نام و عضو شده و با اخذ اکانت، که همچون یک وب سایت اختصاصی برای وی عمل می کند، با حوزه تخصصی خود در تعامل علمی عملی و تبلیغاتی و تجاری باشند.

مزایای جنبی

صاحب هر اکانت می تواند اطلاعات تماس خود را در صفحات اختصاصی خود قید نماید و در جهت افزایش مشتریان خود از وب سایت بهره جوید حتی اگر صاحب اکانت خود دارای وب سایت شخصی باشد می تواند مطالب خود را به سایت خود لینک نماید این کار موجب بهبود فوق العاده رنکینگ سایت شخصی صاحب اکانت نیز خواهد شد.

تبلیغات روزمره

همچنین بخشی جداگانه برای درج آگهی در نظر گرفته شده که صاحبان اکانت می توانند از آن برای تبلیغ خدمت یا کالای خود بهره جویند. آگهی ها به ترتیب تاریخ در صفحه اول سایت به نمایش در می آیند.

اعتبار قانونی

ویکی درم مجوز فعالیت خود از مراجع قانونی لازم اخذ نموده و هم اکنون دارای پروانه عضویت انجمن کسب و کار اینترنتی و نیز دارای نماد اعتماد الکترونیکی دولت از وزارت صنعت و معدن می باشد.

قابلیت ساختاری


ویکی درم در یک هاست اجاره ای نمی باشد بلکه دارای سرور اختصاصی خود است تا سرعت لازم برای استفاده همزمان هزاران کاربر را داشته باشد و کارشناسان سایت بصورت شبانه روز در جهت به روز نگه داشتن امور مشغول فعالیت هستند شایان ذکر است کارشناسان یاد شده همگی دانش آموخته رشته های پزشکی بوده و آماده پاسخگویی به هر گونه سوال و درخواست کاربران می باشد.

<b>برخی اصطلاحات مرسوم پوست و زیبایی</b>	
(PRP) Platelet – Rich Plasma	پلاسمای غنی از پلاکت
Wrinkle	چین و چروک
Nasolabial	خطوط خنده
Acne Scar	جای جوش
Stretch Mark (striae)	ترشحات پوستی
Lipo transfer (fat graft)	تزریق چربی
Hair graft	کاشت مو
(LED) Intra Epidermal	داخل اپیدرم
(LDS) Intradermic - Superficial	درم سطحی
(IDP) Intradermic – Deep (profound)	درم عمقی
(IHD) Intra Hypodermic	داخل هیپودرم
(SC) Subcutaneous	زیر جلد
Rejuvenation	جوانسازی
Eye Circle	تیرگی دور چشم
Melasma	لکه های حاملگی
Alopecia (hair loss)	ریزش مو
Localized Fatty deposits (localized obesity)	تجمع موضعی چربی (چاقی موضعی)
Jowls Lipodystrophy	چربی سوزی غبغب
Lipo lytic	چربی سوزی
Skin Brightening	روشن کنندگی پوست
Layser	لیزر
Light Amplification by stimulated Emission of Radiation	تقویت نور بوسیله تابش القایی
RF - Thightening	آر اف لاغری

## تماس با ما

❖ تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - کوچه مهر - پلاک 7

❖ تلفن : 021- 22850864

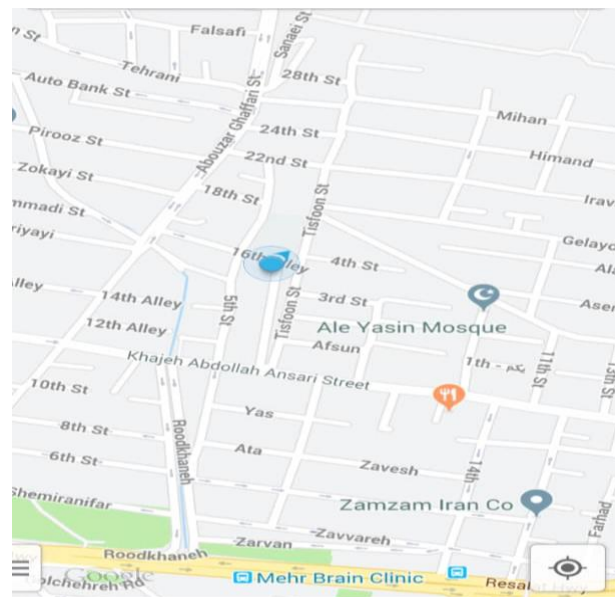

❖ کارشناسان فروش :

- رسول منتظری : 09129465193      سروش منتظری : 09128705884

- مجتبی جباری : 09129533796      شایان شاملو : 09120278785

کارشناسان آی طب به صورت شبانه روزی و حتی روز های تعطیل آماده ی پاسخگویی و درخواست های مشتریان می باشند.